



**Pour un bon fonctionnement du système pneumatique, il est impératif de respecter les consignes suivantes :**

**1. Ne pas utiliser le système pneumatique pour les prélèvements suivants :**

- ▢ Prélèvements très urgents
- ▢ Gaz du sang, pH au cordon
- ▢ Prélèvements de bloc (sauf liquide gastrique)
- ▢ LCR
- ▢ Bilan pour tout patient non repiquable
- ▢ Amniocentèse
- ▢ Prélèvements transportés dans la glace

**2. Ne pas surcharger la pochette : risque de rester bloquée dans le circuit**

**3. Introduire la pochette dans le bon sens : flèche vers le haut**

**4. Ne jamais envoyer de bilans sans pochette parachute : risque +++ d'explosion du contenant (pot urine, pot à copro, flacon d'hémoculture, etc.)**

**5. De même, ne pas envoyer de bilans directement dans la pochette parachute, sans la pochette plastique « labo »**

**6. Toute utilisation ne respectant pas ces consignes se fera sous l'unique responsabilité du service expéditeur**